

Allmän information

Användning

Pegasos produkt är avsedd för att säkert placera/positionerar en person i rullstol/sittsystem. Produkten ska provas ut och monteras av personal som har kvalitativ kunskap inom området. Det är viktigt att vårdpersonal/assistenter har kunskap angående användningen som rör produkten.

Pegasos produkt får inte användas som säkerhetsanordning eller fasthållningsanordning. Att tänka på är att om produkten öppnar sig oavsiktligen ska det inte finnas risk för att brukaren på något sätt skadar sig. Som vid användning av alla positionerande hjälpmedel ska man med stor noggrannhet kontrollera så det inte uppstår några klämskador eller tryckmärken på huden. Finns det risk att brukaren öppnar ex. spännet oavsiktligen ska vårdpersonal alltid finnas nära vid användning av produkten.

Underhåll av produkten

Översyn ska dagligen/regelbundet göras på produktens sömmar, remmar och spännen. Man ska även se till att infästningar är tillförlitliga. Vid upptäckt av brister sak man kontaktar ansvarig förskrivare.

Maskintvätt 40 grader i tvättpåse. Torktumla på låg temperatur. Hängtorkning är det bästa.

Positioneringsbälten

Våra positioneringsbälte tillverkas av utvalda material inom företagets egna väggar. Det ger möjlighet till kundanpassning av produkten samt en kvalitetssäker produkt.

Tankesätt vid val av positioneringsbälte.

1. Välj funktionstyp beroende på grad av positionering. Dragriktning, två eller fyra infästningar.
2. Typ av spänne. Lätt eller svårt att öppna.
3. Storlek på bältet.

Mått på bälten

| | |
|--------|-------------------------------------|
| Small | Avlastare 15x5 cm. Bandlängd 125cm |
| Medium | Avlastare 25x7 cm. Bandlängd 165cm |
| Large | Avlastare 30x8 cm. Bandlängd 210 cm |
| XL: | Avlastare 47x11.5cm Bandlängd 300cm |